










ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ A-DEC






После каждого пациента

-  Очистка (с помощью ультразвука) и стерилизация наконечников пистолета вода-воздух
-  Очистка, смазывание и стерилизация наконечников
-  Промывка инструментальных шлангов
-  Очистка вакуумных линий (после проведения хирургических процедур)
-  Очистка или дезинфекция контактных поверхностей
-  Замена всех барьеров (одноразовых средств защиты различных поверхностей)





Ежедневно или при необходимости

-  Промывка плевательницы в течение одной минуты
-  Очистка чаши плевательницы и фильтра чаши
-  Очистка и дезинфекция вакуумных линий




Еженедельно или при необходимости

-  Очистка изножья кресла (для кресла A-dec 311) или покрытия изножья
-  Очистка клапанов вакуумного отсоса и слюноотсоса
-  Осмотр и техническое обслуживание коллектора твердых частиц (дважды в неделю)
-  Техническое обслуживание коллектора масла (проводится один раз в месяц, если для обслуживания наконечников используется аппарат Assistina или ему подобный)
-  Очистка дезинфицированных поверхностей слабым мыльным раствором для удаления остатков химических продуктов

Ежемесячно

-  Отслеживание качества воды и обслуживание системы циркуляции воды (при необходимости)
-  Техническое обслуживание коллектора масла (проводится еженедельно, если для обслуживания наконечников не используется аппарат Assistina или ему подобный)
-  Смазывание уплотнительных колец вакуумного отсоса и слюноотсоса
-  Очистка защитного экрана стоматологического светильника слабым мыльным раствором (чтобы не поцарапать экран, используйте марлю или кусок мягкой ткани размером 5 см на 5 см)

Ежегодно

-  Замена и смазывание уплотнительных колец пистолета, а также блоков клапанов и кнопок
-  Замена и смазывание уплотнительных колец вакуумного отсоса и слюноотсоса
-  Замена воздушных и водных фильтров в напольной распределительной коробке или в блоке коммуникаций