



## Инструкция по уходу аспирационной системы с Orotol® plus и MD 555 cleaner



# Ежедневная дезинфекция с Orotol® plus

С жидким концентратом Orotol® plus, Вы имеете идеальный препарат для одновременной дезинфекции, дезодорации, очистки и ухода всех аспирационных систем и амальгамасепараторов. Использовать после окончания рабочей смены, при высокой загруженности 2 x ежедневно (в обеденный перерыв и после окончания рабочей смены).

Дезинфекция

## 1 Предварительная очистка




Аспирировать 2 л. воды

## 2 Дозировка 2%




Подготовить 2%-ый раствор:  
1 литр воды + 20 мл Orotol plus

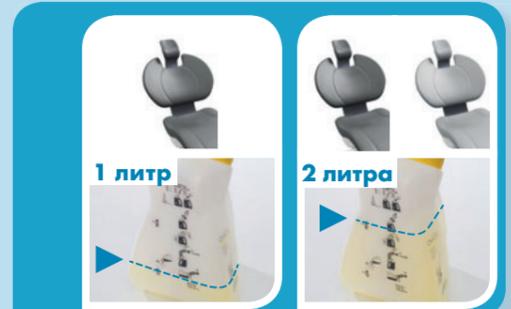

**На одну стоматологическую установку:**  
1 литр воды + 1 колпачек Orotol® plus (20 мл)  
**На 2 стоматологические установки:**  
2 литра воды + 2 колпачка Orotol® plus (40 мл)

## 3 Аспирация

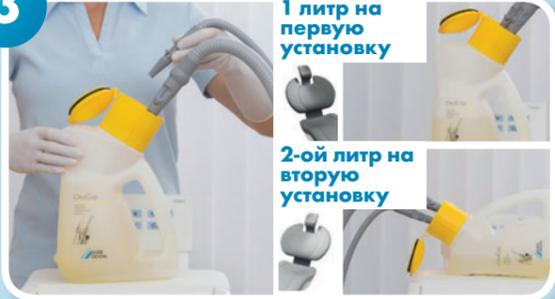

Подсоединить шланги, аспирировать 1 литр раствора на каждую стоматологическую установку

## 4 Дезинфекция плевательницы



Минимум 250 мл раствора на плевательницу

## 5 Экспозиция



Время экспозиции мин. 1 час.  
Спектр активности: бактерицидный, туберкулоцидный, фунгицидный, ограниченно вирулицидный (HIV, HBV, HCV, Ного-вирусы)

## 6 Промывка стоматологической установки



Перед началом работы аспирировать 2 л. воды

DÜRR DENTAL  
THE BEST, BY DESIGN

# Еженедельная очистка с MD 555 cleaner

MD 555 cleaner Ваше специальное чистящее средство для аспирационных систем и амальгамасепараторов. Оно обладает эффективными чистящими свойствами против отложений, засорений и шлама. Использовать от 1 до 2 раз еженедельно (напр. вторник и четверг), при большой загруженности ежедневно в обеденный перерыв.

Очистка

## 1 Предварительная очистка



Аспирировать 2 л. воды

## 2 Дозировка 5%



Подготовить 5%-ый раствор:  
1 литр воды + 50 мл MD 555 cleaner



**На одну стоматологическую установку:**  
1 литр воды + 2,5 колпачка MD 555 cleaner (50 мл)  
**На 2 стоматологические установки:**  
2 литра воды + 5 колпачков MD 555 cleaner (100 мл)

## 3 Аспирация



Подсоединить шланги, аспирировать 2 или 1 литр раствора

## 4 Очистка плевательницы



Минимум 250 мл раствора на плевательницу

## 5 Экспозиция



Времы воздействия от 30 до 120 минут

## 6 Промывка стоматологической установки



Перед началом работы аспирировать 2 л. воды

DÜRR DENTAL  
THE BEST, BY DESIGN